

Reanimatiepoppen Vrij CLB Kempen

Little Anne 11 exemplaren



Resusci Anne 1 exemplaar
(enkel in Hoogstraten te ontlennen)



Little Junior 1 exemplaar
(enkel in Turnhout te ontlennen)




De reanimatiepoppen worden gratis ontleend aan de scholen binnen ons werkingsgebied.

Reinigingsinstructies:

tijdens de les: na elke leerling dient het gelaatsmasker te worden ontsmet


na de les: na elke les dient de luchtweg te worden vervangen

het verwijderen:

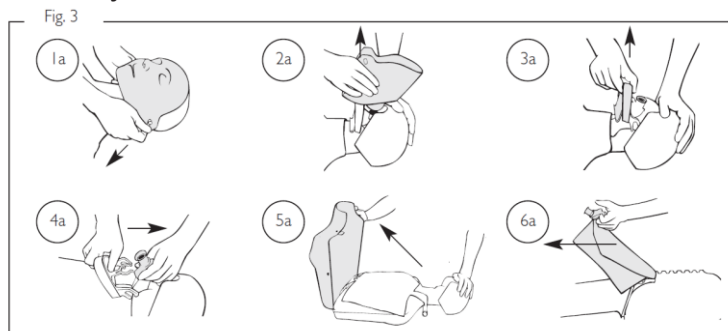

- 1a Maak gelaatsmasker aan beide oren los.
- 2a Hef gelaatsmasker van klepkoppeling
- 3a Verwijder onderkaak van de kleppen in het hoofd
- 4a Verwijder klep
- 5a Open borstbedekking
- 6a Verwijder gebruikte luchtweg en gooi weg

het plaatsen:

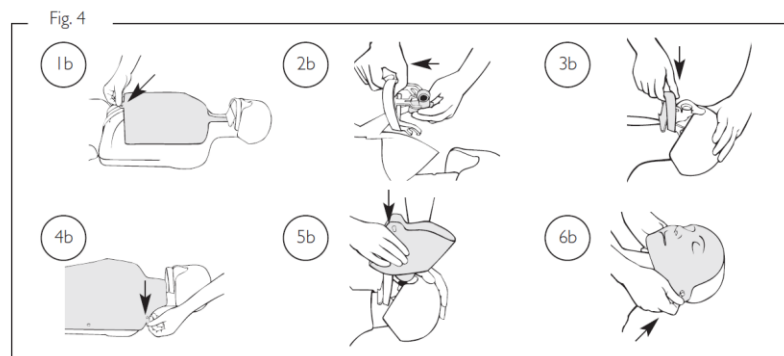

- 1b Leg de long plat op de romp en maak vast aan de haak
- 2b Bevestig luchtwegklep aan kaaksbeen
- 3b Zet kaaksbeen terug op kleppen in het hoofd
- 4b Bevestig de borstbedekking aan de 4 houders
- 5b Duw gelaatskoppeling in luchtwegklep
- 6b Maak gelaat vast aan houders aan beide oren